

ALC SMART

ALKOHOLIO KIEKIO IŠKVĖPTAME ORE MATAVIMO PRIETAISAS

AT6000



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EUROTERA 2007

IVADAS

Prieš naudodami šį prietaisą išsidėmėkite, kad šis prietaisas perspėja apie alkoholio kiekį esantį Jūsų kraujyje. Jūs negalite remtis šio prietaiso parodymu kaip išimtinę priemonę, nustatančią alkoholio intoksikaciją Jūsų kūne, o taip pat jo parodymai nėra pagrindas priimti sprendimą vairuoti automobilį, valdyti kitus įrengimus, ar dalyvauti kitose pavojingose veiklose.

Kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į sunaudoto alkoholio kiekį, todėl prietaiso parodymas nėra pagrindas priimti vienokių ar kitokių sprendimų.

Gamintojas ir importuotojas neatsako už šio prietaiso rezultatų interpretavimą. Jo parodymas nėra teisinis ir asmeninio saugumo pagrindas priimti sprendimą vairuoti ar ne vairuoti automobilį ir valdyti ar ne valdyti kitus sudėtingus įrengimus. Išgertas alkoholio kiekis skirtingai veikia įvairius žmones, jų refleksus, reakciją ir veiksmus, valdant įrengimus ar vairuojant automobilį.

Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai vadovaukitės jos nurodymais.

AT6000 matuoja alkoholį iškvepiame ore ir perskaičiuoja jį promilėmis. Prietaise panaudotas labai naujoviškas puslaidininkinis daviklis, turintis didelį jautrumą ir stabilumą, o prietaiso dizainas ir portatyvumas daro jį labai populiariu kaip prietaisą skirtą asmeniniam naudojimui. Kai išmatuotas alkoholio kiekis viršija iš anksto prietaise nustatytą ribą, jis tai papildomai informuoja apie jums gresiantį pavojų garsiniu ir vizualiniu signalais.


AT6000 pagrindiniai bruožai: jautrus daviklis; greitas rezultato pateikimas; matavimų stabilumas; skystų kristalų ekranas su melsvu pašvietimu; skaitmeninis rezultatų pateikimas; šiuolaikinis dizainas; maži gabaritai; iš anksto nustatyto alkoholio kiekio garsinė ir vizualinė signalizacija; daviklio klaidos indikacija; baterijos įtampos indikacija; ekonomiškas.

TECHNINIAI DUOMENYS


Matavimo ribos	0,00 – 2,00‰
Nustatyta alkoholio riba	0,5‰
Tikslumas	±5%
Matavimo trukmė	nedaugiau 5 sek.
Pasiruošimo matavimui trukmė	nedaugiau 20 sek.
Matavimo kartotinumumas	nedaugiau 20 sek.
Maitinimas	DC4,5V 3xAAA baterijos
Sunaudojama srovė	nedaugiau 120mA
Darbo aplinkos temperatūra	-10 – +50°C
Santykinė drėgmė	nedaugiau 95%
Ekranas	3 jų skaitmenų su melsvu pašvietimu
Išmatavimai	100 x 60 x 20 mm
Svoris	nedaugiau 64 g be baterijų
Baterijos tarnavimo laikas	nemažiau 200 matavimų

PRIETAISO SUDĖTIS IR VEIKIMAS

Sudėtis ir ekrano ženklų reikšmės

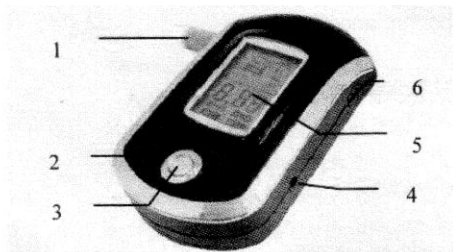

1. Antgalis
2. Garsinis signalas
3. Jungiklis
4. Išorinio maitinimo šaltinio pajungimo vieta
5. Skystų kristalų ekranas
6. Pučiamo oro išėjimo anga.

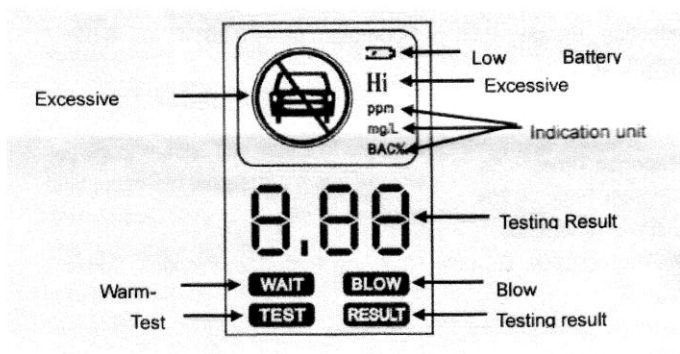

Low battery – baterijos būklės indikatorius
 Excessive – per didelis alkoholio kiekis iškvėptame ore
 Indication unit – matavimo vienetas
 Testing result – matavimo rezultatas
 Warm/wait – vyksta prietaiso įšilimas
 Blow – pūsti
 Test – vyksta matavimas
 Testing result – matavimo rezultatas
 8,88 – alkoholio kiekio rezultatas
 30s Countdown – vyksta prietaiso įšilimas
 „C“ – galima pūsti
 „000“ mirksintis – matavimo varianto keitimas
 „FFF“ daviklio klaida.

Veikimas

Atidarykite dangtelį esantį nugarinėje prietaiso dalyje, pagal nurodytą poliaringumą įdėkite tris tipo AAA 1,5V baterijas ir uždarykite dangtelį.

Prietaisą įjunkite 1 sekundeį nuspausdami jungiklį. Prietaiso įjungimą signalizuoja trumpas pyptelėjimas. Ekrane užsidega „WAIT“. Prasideda prietaiso 20 sekundžių įšilimo laikas. Apie tai ekrane signalizuoja nuo 20 iki 0 bėgantys skaičiai. Kai ekrane „WAIT“ išnyksta, prietaisas pypteli ir ekrane pasirodo mirksintis „BLOW“, „C“ ir automobilio ženklai, reiškiantys kad galima pradėti alkoholio matavimą.

Prieš pradėdami pūsti giliai įkvėpkite orą ir puskite tol kol prietaisas skleis garsinį signalą, o ekrane mirksės skaičiai „000“. Įpūtus reikiamą kiekį „BLOW“ užrašas išnyks ir vietoj jo pasirodys užrašas „TEST“.

Kai prietaisas suskaičiuos alkoholio kiekį, pasigirs garsinis signalas, o prietaiso ekrane pasirodys tiksli išmatuoto alkoholio kiekio reikšmė. Jeigu išmatuoto alkoholio reikšmė mažesnė nei 0,5‰, prietaiso ekrane mirksės automobilio ženklas. Jeigu išmatuoto alkoholio reikšmė bus lygi 0,5‰ arba daugiau, prietaisas pastoviai skleis garsinį signalą, o prietaiso ekrane mirksės užrašai „Hi“ ir „No driving“.

Prietaisas matavimo rezultatą rodo 10 sekundžių, po to du kart pypteli ir išsijungia.

Naujas matavimas atliekamas pakartojant aukščiau aprašytą procedūrą.

PERSPĖJIMAI

Prietaiso nemėtykite ir nesutrenkite.

Esant matavimo aplinkoje daug alkoholio garų prietaiso parodymai gali būti netikslūs.

Matavimo rezultatai gali būti netikslūs, jeigu jie atliekami esant žemai baterijos įtampai.

Matavimą atlikite praėjus ne mažiau kaip 10 minučių nuo paskutinio alkoholio naudojimo.

Matuojant griežtai vadovaukitės šia instrukcija, nes tik tada gausite patikimus matavimo rezultatus.

Nelaikykite ir nesandėliuokite prietaiso agresyvių medžiagų ir dujų aplinkoje.

Normaliai naudojant prietaisą, jo sensorius tarnauja nemažiau kaip du metus.

Norėdami gauti labiau patikimą rezultatą prieš kontrolinį matavimą atlikite du tarpinius matavimus, į kurių rezultatą nekreipkite dėmesio.

Prietaisą valykite švariu audiniu. Valymui nenaudokite kietų medžiagų ir tirpalų su agresyviais tirpikliais.

Ši instrukcija, ryšium su prietaiso tobulinimu, gali būti keičiama be atskiro įspėjimo.

GALIMI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI

Klaida	Galima priežastis	Šalinimo būdas
Nešviečia ekranas	Neteisingai įdėta baterija Baterija visiškai išsikrovusi Gedimas prietaiso elektronikoje	Patikrinkite baterijos poliariškumą Pakeiskite bateriją Kreipkitės į serviso tarnybą
Nereaguoja į alkoholį	Prietaisas neįšilęs Gedimas prietaiso elektronikoje	Laukite kol prietaisas iššils Kreipkitės į serviso tarnybą
Ekrane „FFF“ ir išsijungia	Sensoriaus gedimas	Kreipkitės į serviso tarnybą
Rodo kad baterija išsikrovus ir išsijungia	Baterija išsikrovusi	Bateriją pakeiskite nauja

IMPORTUOTOJAS:

„EUROTERA“ UAB
Tilžės 20, LT-47181, Kaunas
Tel: 837 363570
Faksas: 837 362615
eurotera@aviga.lt

PARDAVĖJAS:

/pavadinimas/ /v. pavardė/ /data/ /parašas/

A.V.